

IDEXX VetLab Station

Skrócony przewodnik użytkownika

Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z IDEXX VetLab* Station (np. dodawanie testów do analiz, ponowne przypisywanie wyników i wprowadzanie wyników testów SNAP*), odwiedź stronę idexx.com/product-info lub learn.idexx.com.



Obsługa Ekranu głównego

Ikony statusu urządzeń

Dowiedz się, które urządzenia są w trakcie analizy lub dostępne, korzystając z kolorowych ikon.

- **Zielona (Gotowe)** – urządzenie jest podłączone i komunikacja jest prawidłowa.
- **Żółta (Zajęty/Czuwanie)** – urządzenie pracuje lub jest w trybie czuwania.
- **Szara (Offline)** – utracono połączenie.
- **Czerwona (Ostrzeżenie)** – wystąpił problem – dotknij ikony, aby uzyskać więcej informacji.

Lista oczekujących lub spis

Jeśli użytkownik posiada zintegrowany system informatyczny do zarządzania kliniką (PIMS), może zmodyfikować ustawienia ekranu głównego, aby uwzględnić listę oczekujących i/lub spis; po włączeniu należy użyć strzałki rozwijanej, aby wybrać, która z następujących list ma zostać wyświetlona:

- **Lista oczekujących** – wyświetla listę pacjentów, którzy mają otwarte zamówienia w zintegrowanym systemie PIMS. Dotknij nazwy pacjenta, aby rozpocząć badanie próbki. Można także użyć ikony usuwania, aby usunąć wybranych pacjentów z listy oczekujących.
- **Spis** – wyświetla listę pacjentów, którzy zostali zarejestrowani w klinice za pomocą zintegrowanego systemu PIMS. Dotknij nazwy pacjenta, aby rozpocząć badanie próbki.

Przycisk wyszukiwania
Dotknij, aby wyszukać konkretnego pacjenta na liście oczekujących lub w spisie (w zależności od tego, która lista jest wyświetlana) i rozpocząć badanie próbki.

Przycisk dodawania/analizy próbki
Dotknij, aby ręcznie wprowadzić informacje o pacjencie i rozpocząć badanie próbki.

Lista W toku
Pozwala sprawdzić bieżące testy, a także testy oczekujące lub wymagające działania.

Centrum wiadomości
Dotknij ikony, aby wyświetlić wiadomości od IDEXX.

Wskaźnik IDEXX SmartService

Kolor kropki wskazuje na status połączenia z IDEXX SmartService* Solutions:

- **Zielona** – połączone
- **Żółta** – trwa łączenie
- **Szara** – wyłączone
- **Czerwona** – offline

Ikona koła zębatego

Dotknij ikony, aby otworzyć nowe menu umożliwiające uzyskanie dostępu do ekranów danego analizatora, dostosowanie ustawień, uzyskanie pomocy lub wyłączenie systemu.


Ikona wyświetlania wszystkich wyników

Dotknij, aby wyświetlić wszystkie historyczne wewnętrzne wyniki diagnostyczne.


Przycisk wyszukiwania archiwa
Umożliwia wyszukiwanie rekordów konkretnego pacjenta.

Lista wyników

Wyświetla listę wyników pacjentów stacjonarnych lecznicy wygenerowanych w ciągu ostatnich 7 dni. Dotknij, aby wybrać pacjenta i wyświetlić lub wydrukować jego wyniki.

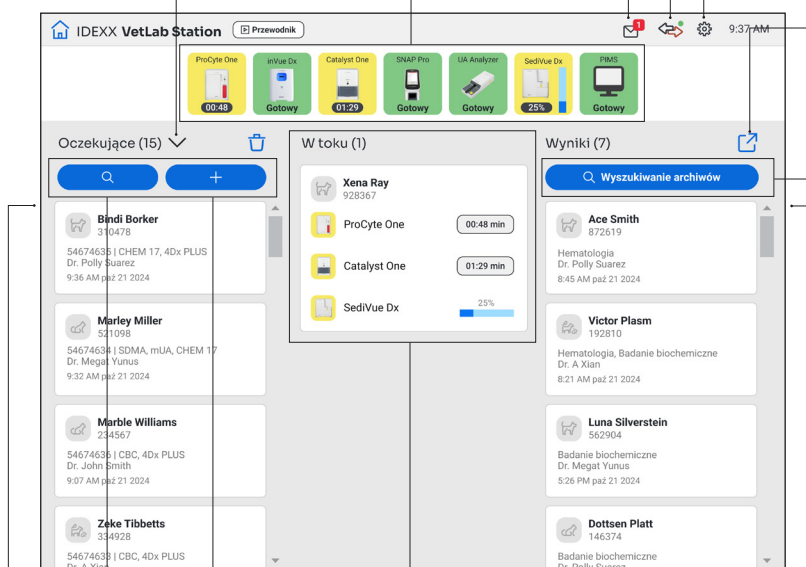

Rozpoczynanie badania próbek z wykorzystaniem zintegrowanego systemu PIMS

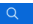1. Dotknij wybranego pacjenta na liście **Oczekujące** lub **Spis** na Ekranie głównym lub dotknij ikony , aby wyszukać pacjenta na liście **Oczekujące** lub w **spisie**.
2. Wybierz ikonę analizatora, którego chcesz użyć, a następnie dotknij przycisku **Uruchom**.

Rozpoczynanie badania próbek bezpośrednio na stacji IDEXX VetLab Station

1. Dotknij  lub  na ekranie głównym.
2. Wybierz/wprowadź informacje o pacjencie:
 - + **Jeśli jest to nowy pacjent** – dotknij opcji **Dodaj nowego pacjenta** i wprowadź informacje o pacjencie/kliencie, a następnie dotknij **Dalej**. Następnie potwierdź/podaj informacje o pacjencie/lecznicy, wybierz ikony analizatorów, których chcesz użyć, a następnie dotknij przycisku **Uruchom**.
 - + **W przypadku istniejącego pacjenta** – aby wyszukać nazwę, dotknij opcji **Pacjent, Nazwisko** lub **Identyfikator klienta**, a następnie zacznij wpisywać stosowne informacje. Dotknij, aby wybrać odpowiedniego pacjenta z listy, i dotknij przycisku **Dalej**. Następnie potwierdź/podaj informacje o pacjencie/lecznicy, wybierz ikony analizatorów, których chcesz użyć, a następnie dotknij przycisku **Uruchom**.
 - + **Jeśli jest to pacjent pilny** – dotknij **Stat**. Wybierz **Gatunek** i **Etap życia**. System automatycznie wprowadzi unikatowy kod, który składa się z daty i godziny, w celu identyfikacji pacjenta (kod można później wykorzystać podczas ponownego przypisywania wyników badania). Dotknij przycisku **Dalej**.
3. Wybierz ikonę analizatora, którego chcesz użyć, a następnie dotknij przycisku **Uruchom**.

Wprowadzanie/edytowanie ręcznych wyników testu SNAP

Wprowadzanie ręcznych wyników testu SNAP:

1. Dotknij ikony **SNAP** na liście W toku lub dotknij przycisku **Wprowadź wyniki** w polu dialogowym Zakończenie zegara SNAP.
2. Dotknij obrazu pasującego do okna wyników testu SNAP.
3. (Opcjonalnie) Dotknij karty **Komentarz**, a następnie wprowadź identyfikator użytkownika i komentarz do wyniku testu.
4. Dotknij przycisku **Zapisz**.

Edytowanie wyników testu SNAP:

1. Dotknij opcji **Zarządzaj wynikami** na ekranie wyników.
2. Dotknij opcji **Edytuj ręczne wyniki**, a następnie wybierz wynik testu SNAP do edycji.
3. Wprowadź zmiany i dotknij przycisku **Zapisz**.

Ręczne wprowadzanie właściwości fizykochemicznych badania moczu




Aby dodać właściwości fizykochemiczne moczu podczas analizy:

1. Uruchom badanie moczu.
2. Po wyświetleniu monitu o wybór ikony analizatora dotknij ikony **Ręczne UA**, a następnie wybierz metodę zbiórki, barwę oraz przejrzystość próbki.
3. Wprowadź ciężar właściwy próbki.
4. Dotknij ikony koloru odpowiadającego pH próbki.
5. Jeśli wyniki badań biochemii są prawidłowe, dotknij przycisku **Ustaw wszystkie na ujemne/prawidłowe**; w przeciwnym razie podaj odpowiednie wyniki. (Jeśli zmieniasz tylko niektóre wyniki, po zakończeniu dotknij przycisku **Dalej**).
6. Wprowadź ewentualne uwagi i dotknij przycisku **Gotowe**.

Edytowanie właściwości ręcznego badania moczu:


1. Dotknij opcji **Zarządzaj wynikami** na ekranie wyników.
2. Dotknij opcji **Edytuj ręczne wyniki** i wybierz wynik ręcznego badania moczu do edycji.
3. Wprowadź zmiany i dotknij przycisku **Zapisz**.

Wyświetlanie i drukowanie wyników


1. Wykonać jedną z następujących czynności:
 - + Aby wyświetlić wyniki bezpośrednio po zakończeniu analizy, należy dotknąć komunikatu powiadomienia o nowych wynikach.
 - + Aby wyświetlić wyniki zarejestrowane w ciągu ostatnich 7 dni, należy dotknąć nazwy pacjenta na liście Wyniki na ekranie głównym.
 - + Wyświetlanie wyników historycznych:
 - W obszarze wyników na ekranie głównym dotknąć opcji **Wyszukiwanie rekordów** lub dotknąć ,
 - wyszukać i wybraćżądanego pacjenta, a następnie dotknąć opcji **Wyświetl**.
 - Na dowolnym innym ekranie niż ekran główny należy dotknąć , wyszukać i wybraćżądanego pacjenta, a następnie dotknąć opcji **Wyświetl**.
2. Dotknij karty zawierającej żądane wyniki.
3. Dotknij opcji , aby wydrukować szczegółowy raport zawierający wszystkie wyniki testów na wybranej karcie.

Cotygodniowa konserwacja

Firma IDEXX zaleca ponowne uruchamianie systemu co tydzień.

1. Dotknij ikony , a następnie dotknij opcji **Wyłącz zasilanie**.
2. Dotknij opcji **Wyłącz zasilanie** lub **Uruchom ponownie**.

Dostosowywanie ustawień

Stację IDEXX VetLab Station można dostosować do potrzeb lecznicy. Dotknij , a następnie dotknij opcji **Ustawienia**.