

IDEXX VetLab Station

Skrócony przewodnik użytkownika

Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z IDEXX VetLab* Station (np. dodawanie testów do analiz, ponowne przypisywanie wyników i wprowadzanie wyników testów SNAP*), odwiedź stronę idexx.com/product-info lub learn.idexx.com.




Obsługa Ekranu głównego

Ikony statusu urządzeń

Dowiedz się, które urządzenia są w trakcie analizy lub dostępne, korzystając z kolorowych ikon.

- **Zielona (Gotowe)** – urządzenie jest podłączone i komunikacja jest prawidłowa.
- **Żółta (Zajęty/Czuwanie)** – urządzenie pracuje lub jest w trybie czuwania.
- **Szara (Offline)** – utracono połączenie.
- **Czerwona (Ostrzeżenie)** – wystąpił problem – dotknij ikony, aby uzyskać więcej informacji.

Centrum wiadomości


Dotknij ikony  aby wyświetlić wiadomości od IDEXX.

Wskaźnik IDEXX SmartService

Kolor kropki wskazuje na status połączenia z IDEXX SmartService* Solutions:

- **Zielona** – połączone
- **Żółta** – trwa łączenie
- **Szara** – wyłączone
- **Czerwona** – offline

Ikona koła zębatego

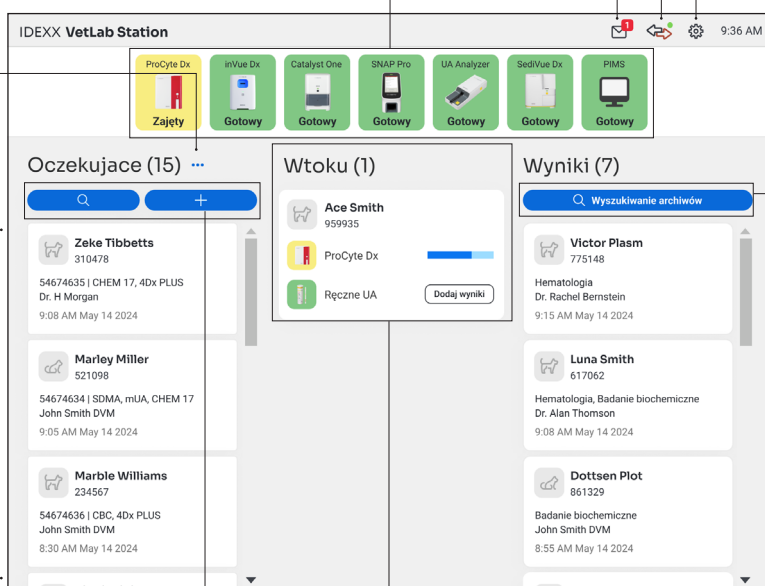
Dotknij ikony , aby otworzyć nowe menu umożliwiające uzyskanie dostępu do ekranów danego analizatora, dostosowanie ustawień, uzyskanie pomocy lub wyłączenie systemu.

Ikona wielokropka (...)

Kliknij ikonę „...”, aby uzyskać dostęp do opcji wyświetlania listy Spis lub aby usunąć zlecenia z listy Oczekujące.

Lista Oczekujące

Sprawdź, które archiwa pacjentów są otwarte w informatycznym systemie zarządzania lecznicą (ang. practice information management system, PIMS).



Wyszukiwanie archiwów

Umożliwia wyszukiwanie archiwów pacjentów.

Wyniki

Wyświetli listę wyników pacjentów stacjonarnych lecznicy wygenerowanych w ciągu ostatnich 7 dni. Dotknij, by wybrać pacjenta i wyświetlić lub wydrukować jego wyniki.


Przyciski Szukaj i Dodaj

Dotknij przycisku **Szukaj**, by wyszukać pacjenta na liście Oczekujące. Dotknij przycisku **Dodaj**, by wprowadzić dane pacjenta ręcznie.

Obszar W toku

Sprawdź bieżące testy, a także testy oczekujące lub wymagające działania.

Rozpoczynanie badania próbek z wykorzystaniem zintegrowanego systemu PIMS

1. Dotknij wybranego pacjenta na liście **Oczekujące** lub **Spis** na Ekranie głównym lub dotknij ikony , aby wyszukać pacjenta na liście **Oczekujące**.
2. Wybierz ikonę analizatora, którego chcesz użyć, a następnie dotknij przycisku **Uruchom**.

Rozpoczynanie badania próbek bezpośrednio na stacji IDEXX VetLab Station

Dotknij ikony  na Ekranie głównym, a następnie wykonaj następujące czynności:

W przypadku nowego pacjenta:

1. Dotknij opcji **Dodaj nowego pacjenta**, wprowadź informacje o pacjencie/kliencie, a następnie dotknij przycisku **Dalej**.
2. Potwierdź/podaj informacje o pacjencie/lecznicy, wybierz ikony analizatorów, których chcesz użyć, a następnie dotknij przycisku **Uruchom**.

W przypadku istniejącego pacjenta:

1. Wybierz pole **Pacjent, Nazwisko** lub **Identyfikator klienta**, a następnie zacznij wpisywać stosowne informacje. Dotknij, by wybrać odpowiedniego pacjenta z listy i dotknij przycisku **Dalej**.
2. Potwierdź/podaj informacje o pacjencie/lecznicy, wybierz ikony analizatorów, których chcesz użyć, a następnie dotknij przycisku **Uruchom**.

W nagłym przypadku:

1. Dotknij opcji **Stat**.
2. Wybierz **Gatunek** i **Etap życia**. System automatycznie wprowadzi unikatowy kod, który składa się z daty i godziny, w celu identyfikacji pacjenta (kod można później wykorzystać podczas ponownego przypisywania wyników badania).
3. Dotknij przycisku **Dalej**.
4. Wybierz ikonę analizatora, którego chcesz użyć, a następnie dotknij przycisku **Uruchom**.

Wprowadzanie/edytowanie ręcznych wyników testu SNAP

Wprowadzanie ręcznych wyników testu SNAP:

1. Dotknij ikony **SNAP** w obszarze W toku lub dotknij przycisku **Wprowadź wyniki** w polu dialogowym Zakończenie zegara SNAP.
2. Dotknij obrazu pasującego do okna wyników testu SNAP.
3. (Opcjonalnie) Dotknij karty **Komentarz**, a następnie wprowadź identyfikator użytkownika i komentarz do wyniku testu.
4. Dotknij przycisku **Zapisz**.

Edytowanie wyników testu SNAP:

1. Dotknij opcji **Zarządzaj wynikami** na ekranie wyników.
2. Dotknij opcji **Edytuj ręczne wyniki**, a następnie wybierz wynik testu SNAP do edycji.
3. Wprowadź zmiany i dotknij przycisku **Zapisz**.

Ręczne wprowadzanie właściwości fizykochemicznych badania moczu

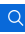

Aby dodać właściwości fizykochemiczne moczu podczas analizy:

1. Uruchom badanie moczu.
2. Po wyświetleniu monitu o wybór ikony analizatora dotknij ikony **Ręczne UA**, a następnie wybierz metodę zbiórki, barwę oraz przejrzystość próbki.
3. Wprowadź ciężar właściwy próbki.
4. Dotknij ikony koloru odpowiadającego pH próbki.
5. Jeśli wyniki badań biochemii są prawidłowe, dotknij przycisku **Ustaw wszystkie na ujemne/prawidłowe**; w przeciwnym razie podaj odpowiednie wyniki. (Jeśli zmieniasz tylko niektóre wyniki, po zakończeniu dotknij przycisku **Dalej**).
6. Wprowadź ewentualne uwagi i dotknij przycisku **Gotowe**.

Edytowanie właściwości ręcznego badania moczu:


1. Dotknij opcji **Zarządzaj wynikami** na ekranie wyników.
2. Dotknij opcji **Edytuj ręczne wyniki** i wybierz wynik ręcznego badania moczu do edycji.
3. Wprowadź zmiany i dotknij przycisku **Zapisz**.

Wyświetlanie i drukowanie wyników


1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - + Wybierz pacjenta z listy Wyniki na Ekranie głównym.
 - + Dotknij komunikatu z powiadomieniem o nowych wynikach.
 - + Na liście Wyniki na Ekranie głównym dotknij opcji  **Wyszukiwanie archiwów**, wyszukaj i wybierz pacjenta, a następnie dotknij przycisku **Pokaż**.
2. Dotknij karty zawierającej żądane wyniki.
3. Dotknij opcji , aby wydrukować szczegółowy raport zawierający wszystkie wyniki testów na wybranej karcie.

Cotygodniowa konserwacja

Firma IDEXX zaleca ponowne uruchamianie systemu co tydzień.

1. Dotknij ikony , a następnie dotknij opcji **Wyłącz zasilanie**.
2. Dotknij opcji **Wyłącz zasilanie** lub **Uruchom ponownie**.

Dostosowywanie ustawień

Stację IDEXX VetLab Station można dostosować do potrzeb lecznicy. Dotknij ikony , a następnie dotknij opcji **Ustawienia**.