



Algorytm dla testu Catalyst Pancreatic Lipase

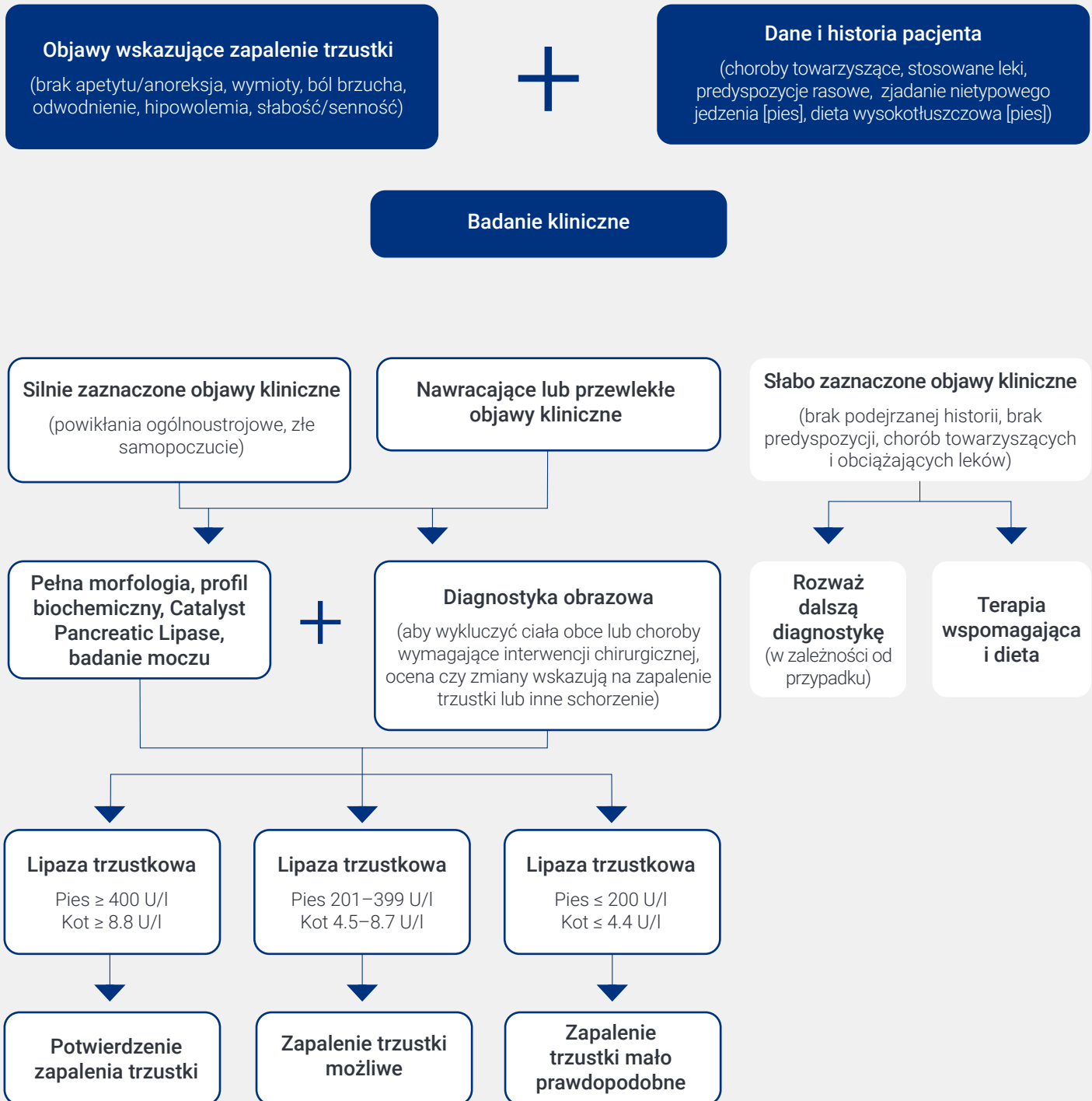

*Jeśli do tego występują nieprawidłowości sugerujące inne schorzenie, trzustka jest najprawdopodobniej jednym ze składowych, ale nie jedyną przyczyną schorzenia. (weź pod uwagę ciała obce, nerki, wątroba, zaburzenia hormonalne).

Interpretacja wyników testu Catalyst Pancreatic Lipase

Wykonaj test Catalyst Pancreatic Lipase jeśli występują objawy kliniczne¹ zapalenia trzustki lub jeśli lipaza całkowita jest znacząco podwyższona.

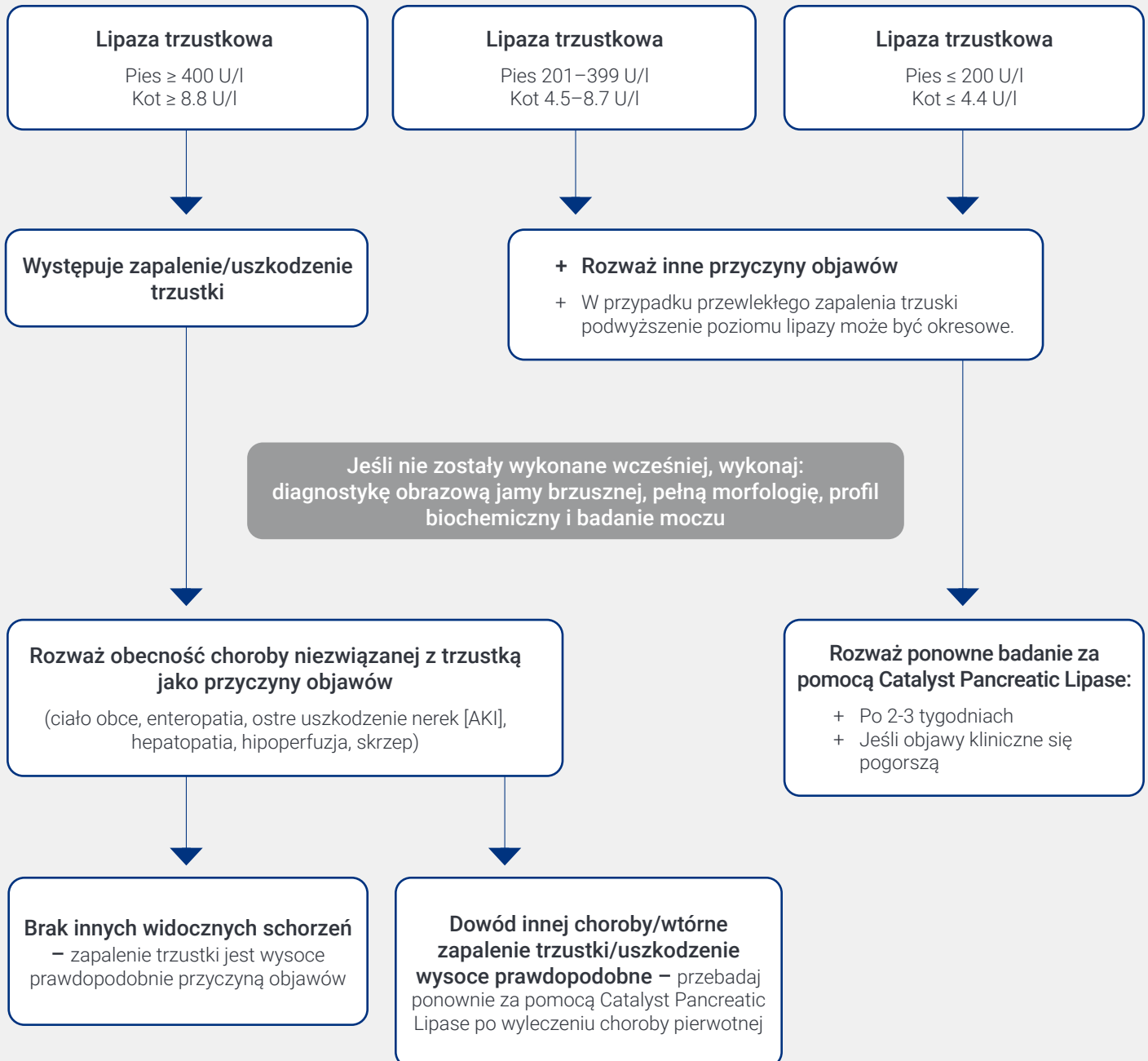

¹Objawy kliniczne zapalenia trzustki mogą być słabo wyrażone i niespecyficzne, szczególnie w wypadku formy przewlekłej.
²około trzykrotnie powyżej górnej granicy referencyjnej.